

Комерційна пропозиція

Сжигатель игл и деструктор шприцев NULIFE MEDTECH DOTS

Код: NULIFE DOTS

Стоимость: **2.250,00 грн.**

Описание

Безопасный и компактный настольный прибор, с помощью которого можно легко утилизировать использованные иглы и шприцы, благодаря встроенному сжигателю и ножу для отрезания канюли шприца.

В сравнении с механическими устройствами для деструкции игл, где иглы режутся, но все равно остаются острыми, инфицированными и могут быть причиной проникновения инфекции в организм здорового человека, **Nulife DOTS** сжигает иглу, обеззараживает ее и разрушает шприц.

Принцип действия:

Игла, находящаяся на шприце вводится в отверстие на верхней поверхности устройства. Игла замыкает верхний, и расположенный на небольшом от него расстоянии, нижний электроды, в результате чего игла нагревается и начинает плавиться. Весь процесс, в зависимости от длины и диаметра иглы, занимает 2-3 сек. Остатки уничтоженных игл в виде гранул металла собираются в отдельном контейнере.

Технические характеристики:

Размеры: 165 мм x 115 мм x 120 мм

Вес: 1,7 кг.

Эл.питание: 230 вольт, +/- 10% 50 Гц, однофазный

Защита: 2 амперные ¼ дюйма стеклянные предохранители

Комплектация:

1. Сжигатель игл и деструктор шприцев с гильотиной для отреза канюли (или без гильотины) **Nulife DOTS** - 1 шт.
2. Запасной нож для срезания канюли шприца - 1 шт.
3. Паспорт и инструкция по применению - 1 шт.

При использовании данного прибора, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- 1) Перед подсоединением прибора, проверьте на индикаторе, совпадает ли напряжение прибора с напряжением приборов на вашем рабочем месте.
- 2) Никогда не опускайте провод и штепсель в воду.
- 3) Отключайте прибор, если он не используется, а так же перед очисткой.
- 4) Выключайте прибор перед изъятием накопительного подноса.
- 5) Чистить прибор сверху, протирая его только мягкой сухой тряпкой. После изъятия накопительного подноса, он должен быть очищен с дезинфекцией.
- 6) Если для прибора требуется удлинитель, то следует использовать шнур для тока в 5А. Шнур, маркированный меньшими амперами, может сгореть.
- 7) Разместите прибор так, чтобы провод не мешал работе.
- 8) Прибор предназначен только для сжигания игл от **19g** (1,1мм) до **31g** (0,25мм), с последующим срезанием канюли шприца. Данный прибор для уничтожения других металлических предметов не предназначен. Не пробуйте уничтожать стеклянные и металлические шприцы: это может привести к серьезной поломке лезвия прибора.
- 9) Не используйте прибор при наличии летучих газов и других летучих субстанций.



- 10) Не вставляйте палец в прибор.
- 11) Для лучшей защиты используйте плавкий предохранитель, соответствующий номиналу предохранителя прибора.
- 12) Не ломайте иглу резакром.
- 13) Сжигайте максимум 2 иглы в минуту.

